

「でき iPad。」が届いたら...

2013.12.11->2016.3.3


お手元に「でき iPad。」が届いたら、初期設定および iPad や iPhone などの iOS 製品との接続を試みましょう。

「でき iPad。」は、iPad だけでなく、iPad mini ・ iPhone ・ iPod Touch ・ などと Bluetooth (無線) で接続して使用することができます。ご利用までの手順をご案内いたします。

1. 「でき iPad。」に電源とスイッチを接続します。

1-1. 電源を接続する

・乾電池で使用する場合

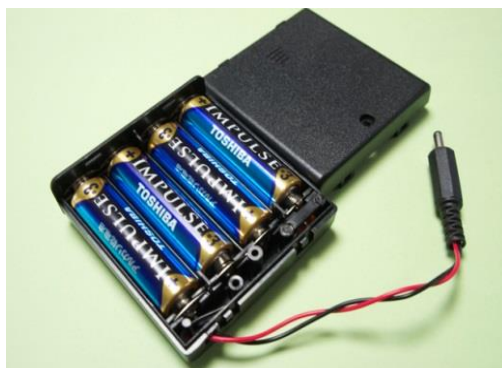

電池ボックスの電源スイッチが off になっていることを確認してください。

電池ボックスのフタを開けます。開けにくい場合、フタについているマークを軽く押しながらかきながらスライドさせて開けます。

極性に注意して、単3電池を4本いれます。充電式電池も使用可能です。

電池ボックスのフタを閉じる際には、フタについている爪を先に入れてから下に押し込むようにすると閉じやすいです。

電池ボックスに電池を入れましたら、「でき iPad。」のジャックに電池ボックスのプラグを接続します。プラグを回転するように挿入しますと入れやすいです。

初めて使用する場合は、必ず新しい電池をご利用ください。なお、外出時は電池の予備をご持参ください。



・AC アダプタで使用する場合

コード上についている電源スイッチが「切」(off)になっていることを確認してください。

「でき iPad。」のジャックに AC アダプタのプラグを接続します。AC アダプタをコンセントに入れます。電源はまだ入れません。

1-2. スイッチを接続する



「でき iPad。」と一体になっている、「Φ3.5x4 ユニット。」の黄色いシールに①と書かれた方のジャックに、ご利用になるスイッチのプラグを接続します。

PPS スイッチは、長く ON しても ON の信号が短いため、ペアリング時には利用できません

ここではまだ、「でき iPad。」の電源ユニットのスイッチをオンにしないでください。オンにしていたら、「でき iPad。」の電源をオフにしてください。

2. ペアリングの準備をします



iPad, iPhone の設定を開き、Bluetooth をオンにします。

デバイス欄にすでに DekilPad の文字がある場合は、削除してから3項の操作に進んでください。

3. 「でき iPad。」と iPad, iPhone を Bluetooth で接続します



こちらの操作を行う前に必ずスイッチコントロールが off になっているか、確認してから行ってください。

SW1 に接続したスイッチを押しながら、「でき iPad。」につないだ電池ボックス、または AC アダプタの電源を入れます。

電源を入れると、LED が点灯しメロディが流れます。

スイッチは押したまま、離さないでください。

数秒後、ブツと音が鳴り LED が消灯します。ここでスイッチを離してください。

約1秒間隔で数字を数えながら行うと良いでしょう。

iPad, iPhone の画面に目を移します。“Deki iPad ”と表示がでましたら、その表示されたところをタップしてください。

「でき iPad。」が届いたら...

タップ後、約5から6秒以内に「接続されました」と表示しない場合は、すみやかに、「でき iPad。」の電源をオフにしてください。

iPad,iPhone の Bluetooth の項目の緑を白(オフ)にし、再度緑(オン)にします。ペアリング作業でこれがコツです。

3 の項目をやり直してください。

タップ後、「接続されました」という表示が出ましたら、「でき iPad。」と iPad,iPhone の接続が出来ました！

万が一、ペアリングに3回失敗した場合は、iOS 機器をリセットしてください。リセットの方法は、Sleep ボタンと HOME ボタンを同時に ON し、リンゴマークがでましたらボタンから手を放してください。その後、普通に iOS 製品を起動してください。

再度、3 の項目をやり直してください。



ペアリングについて、動画説明を用意してあります。
ホームページからご覧ください。

Deki iPad 表示に続く数字は、「でき iPad。」のバージョンを表します。

4. スイッチコントロールの設定(スイッチコントロールを利用したい場合)

マニュアル(スイッチコントロール対応版の6ページ)をご覧ください。スイッチのアクションを設定してください。

アクション設定をしないと、スイッチコントロールの利用はできません。 iOS の仕様です。

ユーザーマニュアルの 7. スイッチコントロールの設定をご参照ください。

5. アクセシビリティメニューの設定

設定 → 一般 → アクセシビリティ → ショートカットの順に進み、スイッチコントロールや AssistiveTouch にチェックを入れてください。

この設定にしておきますと、サポーターやご家族が後に操作する際に、ホームボタンを 3 回押せばスイッチコントロールモードや AssistiveTouch モードの ON/OFF が容易にできるようになります。ホーム画面に戻り、iOS 製品のホームボタンを 3 回押してみてください。

アクセシビリティメニューが表示されますので、用途によって選択してください。

6. 日常の使い方

基本的には、「でき iPad。」の電源は切らずにお使いください。どうしても切る場合には電源 ON 時には、「でき iPad。」に接続したスイッチには触れないでください。(ペアリングモードに移行してしまうからです。)

7. 「できマウス。」プロジェクトのホームページより、必要によってユーザーマニュアルをダウンロードしましょう。

iOS 製品で「できマウス。」プロジェクトのホームページ <http://dekimouse.org/wp/>を開きユーザーマニュアルをご覧になり、画面の余白をタップし iBooks で開くを選択しますと、マニュアルを本棚に取り込めます。

8. 「でき iPad。」と電池 Box の合体

電池 BOX は電池を入れますと重くなります。落下事故でケーブル断線を防ぐためにも、「でき iPad。」と電池 Box をマジックテープで合体させましょう。



付属のマジックテープを4つに切って、下図のように貼ってみてはいかがでしょうか。

製品のシリアル番号が隠れないように貼ってください。

<ご注意ください！>

- ・ 「でき iPad。」を別の iOS 製品とご利用になる場合には、それまでお使いの iOS 製品とのペアリングを解除して行ってください。
- ・ iOS のアップデートを行う際は、まずは「できマウス。」プロジェクトのホームページをご覧ください、最新の iOS に「でき iPad。」が対応しているかをご確認の上、アップデートを行うようにしてください。
- ・ 電池 BOX をお使いの場合、電池切れにご注意ください。
- ・ 「でき iPad。」は超省電力モードを備えており、電源ユニットのプラグは消耗しやすいので、抜き差しせずにお使いください。

<お願い>

ホームページにて動画マニュアルも随時アップロードしておりますので、そちらを一度ご覧くださいますようお願い申し上げます。

ホームページでは、説明書のダウンロードもできます。

「でき iPad。」のバージョンアップのご案内は、ホームページや facebook でご案内いたします。

「できマウス。」プロジェクト

<http://dekimouse.org/wp/>