

## 「でき iPad2。」操作モード設定例(あくまで一例です)

「でき iPad2。」は、操作モードが4種類あります。

ここでは、どの操作モードにするかの参考例を記します。

スイッチの操作がどの程度可能か、あるいは利用するアプリによって、「でき iPad2。」の操作モードを決めます。

「でき iPad2。」本体の電池カバーを開け、電池カバー裏に説明シールが貼ってあります。

DIP スイッチは1から4まで番号があります。1から2の組み合わせで操作モードを設定します。スイッチコントロールを利用する際は、操作モードを設定したのち、iOSの画面を設定/一般/アクセシビリティ/スイッチコントロール/スイッチと進んでアクションを設定します。



1. スイッチ1個あるいは複数個の操作可能な場合は、**スイッチ4個モード**、長 ON が可能な場合は、1 個のスイッチに二通りのアクション設定ができます。  
ただし、長 ON(長押し)を有効にしますと、スイッチを On したときのアクション発生が、スイッチを OFF したときになります。これは iOS の仕様です。
2. スイッチを任意に数回 On できる場合は **ON の回数モード**、これによってスイッチを4個操作と同じことができます。
3. 振戦がある場合、スイッチの **ON の回数モード**を利用し、1回から4回まですべて同じアクションを設定します。  
これによって、不随意的にスイッチを数回 ON しても、同じアクションが1回だけの操作ができます。
4. スイッチ対応アプリ、たとえば Space/Enter/1/3 のキーで操作するアプリを利用したい場合は、**スイッチアプリモード A**。  
この場合は、**スイッチコントロールは OFF** で利用します。
5. スイッチ対応アプリ、たとえばトーキングエイド for iPad や DropTalk を利用したい場合は、**スイッチアプリモード B**。  
この場合は、**スイッチコントロールは OFF** で利用します。

## 各操作モードにおける特徴

### 1. スイッチ4個モード

スイッチ ON で反応しますので、スイッチコントロールのポイントモードで利用の際は、反応が良いです。

スイッチの長押しにも対応しますが、iOS の設定で長押しをオンにすると、スイッチを放して機能するようになります。

これは、iOS の仕様です。

スイッチを SW2 にも接続の場合は3秒間スイッチを長 ON すると、トリプル HOME が、5秒間長 ON で iPad を Sleep にし、「でき iPad2。」も Sleep します。SW2 に長押し機能を割り当てる場合は、1.5 秒以下にしてください。

### 2. スイッチ ON 回数モード

ポイントモードでの利用の際は、ほんのわずか遅れを感じます。

1回から4回までの ON は、スイッチコントロールのアクション設定ができます。

5回からは下記のような機能が設定されております。

5回:スクリーンキーボードの表示・非表示

6回:トリプル HOME (iOS10以降)

9回:iPad や iPhone を Sleep にして「でき iPad2。」も Sleep になります。

スイッチを SW2 にも接続した場合は音楽を容易に楽しむことができます。

スイッチを1回 ON:再生・停止 2回 ON:次の曲 3回 ON:前の曲

4回 ON:ボリューム下げる 5回 ON:ボリュームを上げる

6回 ON:トリプル HOME (iOS10以降)

9回 ON で iPad や iPhone を Sleep にして「でき iPad2。」も Sleep になります。

スイッチを SW3 にも接続した場合はカメラアプリにおいてシャッター機能となります。

### 3. スイッチアプリモード A とスイッチアプリモード B

長 ON には対応していません。

スイッチを SW2 にも接続した場合は、3秒間スイッチを長 ON すると、トリプル HOME が、5秒間長 ON で iPad を Sleep にし、「でき iPad2。」も Sleep します。

### 各操作モードにおける出力されるキーの種類

スイッチ4個モード:SW1:↓ SW2:← SW3:↑ SW4:→

スイッチ ON 回数モード:1回:Space 2回:Enter 3回:1 4回:3

スイッチアプリモード A:SW1:Space SW2:Enter SW3:1 SW4:3

スイッチアプリモード B:SW1:Space SW2:h SW3:k SW4:1(エル)

\*スイッチアプリモード A または B はスイッチコントロールを ON にした場合でも、スイッチコントロールのアクションの設定が可能です。ただし、出力されるキーが同じの場合は、すでに使用済みとなります。

「でき iPad2。」が皆様に可愛がっていただけることを願っております。

「できマウス。」プロジェクト

<http://dekimouse.org/wp/>

