

# 「でき iPad2。」ユーザーマニュアル Ver1.2対応

2016.08.11->2016.10.31

お好みの外部スイッチで、iPad・ iPhone・ iPodTouch を利用したい！ その願いのお手伝いができればうれしいです。



「できマウス。」プロジェクト  
<http://dekimouse.org/wp/>

## 目次

1. 「でき iPad2。」の概要
2. 「でき iPad2。」仕様
3. 「でき iPad2。」外観
4. 「でき iPad2。」を iPad や iPhone にペアリング(登録)する
5. 「でき iPad2。」を iPad や iPhone から接続を解除する
6. DIP スイッチの設定とリセットボタン
7. スイッチコントロールの設定と操作モードの設定
  - 7-1. 事前の設定
  - 7-2. スイッチ4個モードの設定
  - 7-3. スイッチ ON の回数モードの設定
  - 7-4. スイッチ対応アプリモードの設定
  - 7-5. トーキングエイド for iPad モードの設定
8. ご利用者以外に iPad・iPhone を利用する場合の設定
9. macOS のスイッチコントロールで使う
10. 個人と公共の設定について(DIP スイッチ3)
11. ペアリング4台までの制限をクリアする方法
12. ボタン電池の交換
13. スイッチの抜き差し
14. 「でき iPad2。」でできないこと
15. サポート&問い合わせ
16. 電話サポートを受けたい
17. ご注意とお願い
18. ご協力をお願い

### 【ご注意】

1. ボタン電池の誤飲にご注意ください。
2. 「でき iPad2。」をベッドの中に入れてください。
3. 5VDC の場合良質のケーブルをご利用ください。  
5VDC を利用する際は、電池を取り外してください。
4. 端子には、しっかりと奥まで挿入してください。
5. iOS のアップデートは、「でき iPad2。」がサポートしているかをホームページで確認してから行って下さい。
6. 電池を外す際には、ピンセットなどは使わないでください。
7. 付属電池は試供用です。電池の予備をご用意ください。

**【お願い】**ユーザーマニュアルは追加変更があります。時々ホームページをご覧になり、サイトからダウンロードしてください。

<http://dekimouse.org/wp/kiki/dekiipad2> から PDF でダウンロードできます。

ユーザーマニュアルは、iBooks の書棚に取り込むことができます。

「でき iPad2。」は、生まれたばかりです。皆様の愛ディアで育てていただけたら幸いです。不具合などございましたら、ご連絡とご協力をよろしくお願いいたします。

iPad iPad mini iPhone iPod touch AppleTV Mac は、Apple 社の登録商標です。

## 1. 「でき iPad2。」の概要

「でき iPad2。」は、お好みの外部スイッチを利用して iPad など iOS 製品の操作ができます。

スイッチコントロールを使わないアプリを操作する場合は、トーキングエイド for iPad モードや、スイッチ対応アプリの操作モードもあります。

## 2. 「でき iPad2。」仕様

種別：Bluetooth スイッチインターフェイス（電波法の技術適合基準証明取得）

対応：iPad/iPhone/iPodTouch

寸法：横 47 x 縦 92 x 高 12mm（スイッチ接続部と突起部含む）

重さ：41 g（ボタン電池含む）

電源：ボタン電池（CR2032）あるいは 5VDC（USB-microUSB 変換ケーブルで iOS 製品の AC アダプタなどから供給）

省電力と安全対策：DeepSleep モード搭載・ポリスイッチ（再生可能なヒューズ）を搭載

スイッチ：付属いたしません


ファームウェア：バージョンアップ書き換えが可能

## 3. 「でき iPad2。」の外観

### 3-1. 各部の名称




<本体外観>

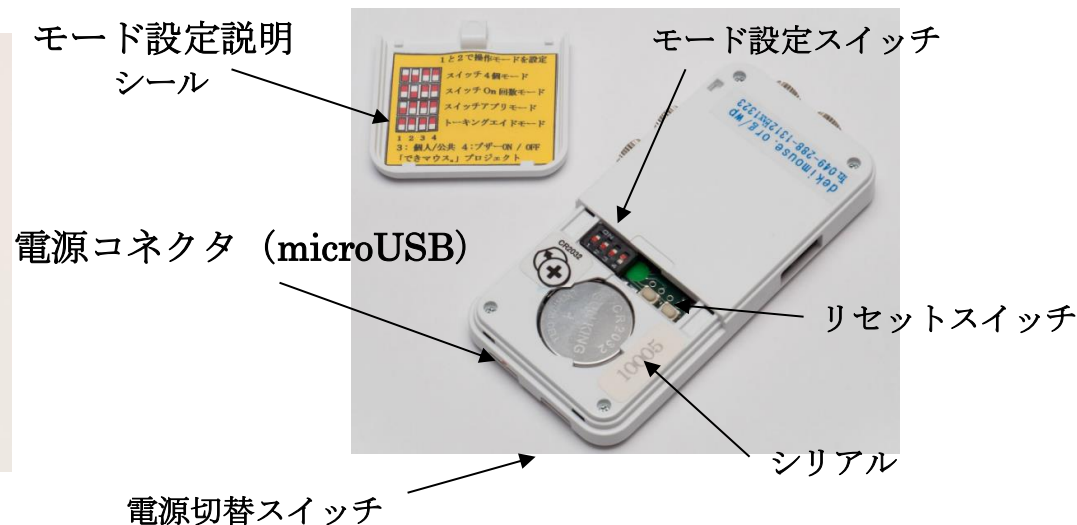

<設定スイッチと電池ホルダー>

### 3-2. 電源と切替スイッチ

スライドスイッチで電源の切替と OFF ができます。

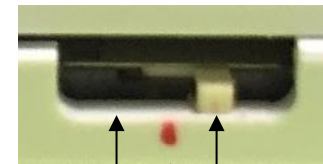

内蔵ボタン電池を使用  
電源 OFF  
microUSB から 5 V 供給

5VDC (USB-microUSB 変換ケーブルで iOS 製品の AC アダプタなどから供給します。  
電池は、ボタン電池 CR2032 を使います。

### 3-3. ステータス LED

図 3-3 の LED は、「でき iPad 2.」の状態を表します。

LED の表示	状態
点滅	ペアリング要求
点灯	ペアリング完了
消灯	電源 OFF か DeepSleep

LED は電池使用や5VDC 使用の場合は緑色となります。

**\* 注意 \*** microUSB端子から 5VDC を入力する場合、電源切替のスライドスイッチを microUSB 端子側にスライドしないと、電池使用のままとなります。AC アダプタはiPadやiPhone付属のアダプタなどと USB:microUSB変換ケーブルをご利用ください。変換ケーブルは良質なケーブルをご利用ください。

iOSやMac製品から一定距離離れるとペアリング要求となり、LED が点滅します。近づくとまた自動接続されます。

### 3-4. 拡張コネクタ




現在は機能しません。

#### 4. 「でき iPad2。」を iPad や iPhone にペアリング（登録）する

ホームページで動画で解説していますのでご覧ください。

ペアリングは、一度行えば OK です。電源を再投入した場合などでは自動的に接続します。

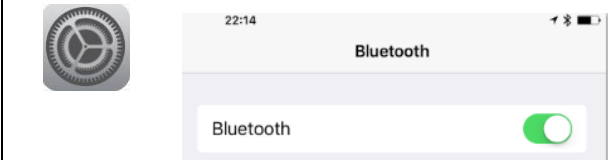DIP スイッチ 3 が OFF の場合は、毎回ペアリングが必要です。（見かけの接続となりますので再ペアリングが必要です）

<p>1. iPad や iPhone の操作1</p> 	<p>設定アイコンから Bluetooth と進みます。 Bluetooth がオフの場合は、オン（緑）にします。</p>
<p>2. iPad や iPhone の操作2</p> 	<p>「でき iPad2。」の電源を入れます。 「でき iPad2。」が DeepSleep で LED が消灯している場合は、 「でき iPad2。」に接続のスイッチを On します。 LED が点滅して、画面に DekiiPad2 のデバイス名が表示しますのでタップします。 DekiiPad2 の文字が表示しない場合は、Bluetooth 画面スイッチを白・緑と操作すると表示します。 LED が点灯の場合は、他の iOS 機器とペアリング済みの状態です。</p>
<p>3. iPad や iPhone の操作3</p>  <p>DekiiPad2 の後ろの文字が「でき iPad2。」のバージョンです。 この例では、Ver1.1 シリアル10003を表しております。</p>	<p>Bluetooth ペアリングの要求が表示されますので、“ペアリング”をタップします。 DekiiPad2 のデバイス欄に“接続済み”と表示すれば、ペアリング作業は完了です。 <b>*注意*</b>この状態でスイッチコントロールを ON にした場合、“デバイスが見つかりません”が表示される場合は、不完全なペアリングなので、接続済みの隣の①をIタップして指示に従って削除します。LEDが点滅しますので、前項からやり直してください。LEDが消灯してしまったときは、接続のスイッチを ON します。</p>


## 5. 「でき iPad 2。」を iPad や iPhone から接続を解除する

<p>1. iPad や iPhone の操作1</p> 	<p>設定アイコンから Bluetooth と進みます。 Bluetooth がオフの場合は、オン(緑)にします。</p>
<p>2. iPad や iPhone の操作2</p> 	<p>左図の①をタップして、メッセージに従って削除します。削除されるとその他のデバイスに表示され、「でき iPad2。」のLED が点滅し、ペアリング要求状態となります。放置して約 30 秒後に DeepSlee に移行します。 接続スイッチを ON すると、再度ペアリング要求状態となります。</p>

## 6 .DIP スイッチの設定とリセットボタン

DIP スイッチの操作は、いつ行ってもかまいません。即座に機能いたします。電池部のケース蓋をスライドして開けます。

DIP スイッチ (1 番 2 番で操作モード設定)

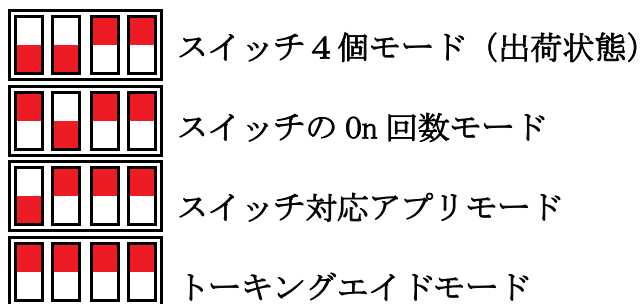

1 2 3 4


ブザー ON/OFF (ブザー音を停止の場合、電池が長持ちします。)

個人/公共 公共の場合はスイッチ無操作で Sleep 移行 30 分 (接続も切れます)

教育機関や展示室では OFF を推奨 (毎回ペアリングが必要)

操作モード設定

DIP スイッチ

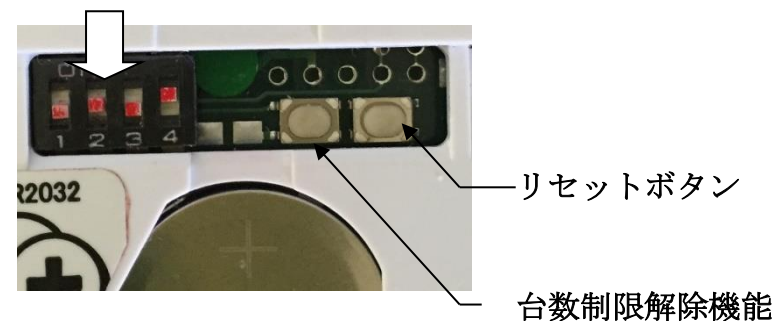




\* 台数制限解除の項をご覧ください



## 7.スイッチコントロールの設定と操作モードの設定

ペアリングだけでは、スイッチコントロールは利用できません。

アクション設定を行なってください。

### 7-1.事前の設定

設定/一般/アクセシビリティ/スイッチコントロールと進みます	
	<p>ハイライト(スキャン)の種類を選択します。とりあえず自動にしておきます。</p> <p>自動ハイライトの時間とは、オートスキャンの時間です。タップして時間を合わせます。</p> <p>最初の項目で一時停止は操作慣れないうちは、0.5 秒程度の設定がお勧めです。</p> <p>繰り返しは2回がお勧めです。</p> <p>移動の繰り返しはオフのまま。</p> <p>長押しは、1個のスイッチを短 On や長 On が可能な場合、2個のスイッチがあるように機能します。この場合の長 On の時間を設定します。ただし、高速入力を行いたい場合は長押しはオフにします。</p>
	<p>この項は、とりあえず左図の設定をお勧めします。</p>
	<p>この項は、とりあえず左図の設定をお勧めします。</p>

 <p>ポイントハイライト</p> <p>ガイドカーソルの速度 31 &gt;</p>	<p>ガイドカーソルの速度とは、ポイントモードでの操作の際のバーの動作速度を設定します。 とりあえず左図の設定をお勧めします。</p>
 <p>オーディオ</p> <p>効果音 <input type="checkbox"/></p> <p>読み上げ オフ &gt;</p> <p>メニュー項目 &gt;</p>	<p>この項は、とりあえず左図の設定をお勧めします。</p>
 <p>項目をグループ化 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>複数項目をまとめてハイライトします。項目単位よりも移動が速くなります。</p>	<p>たとえばアイコン画面の場合、ON(緑)の場合は、行ごとにスキャンします。</p>
 <p>ビジュアル</p> <p>大きいカーソルを使用 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>カーソルの色 ブルー &gt;</p> <p>保存済みのジェスチャ なし &gt;</p>	<p>この項は、とりあえず左図の設定をお勧めします。</p> <p>大きいカーソルをONにすると、フォーカス枠表示が太くなります。 カーソルの色は5色から選択できます。 保存済みのジェスチャはあらかじめジェスチャーを作成し名前を付けて保存しておく必要があります。</p>
<p>次ページからのモード切替は、ケース底面のスライドカバーを開け、DIP スイッチを操作します。カバー裏面に DIP スイッチの説明があります。</p>	



7-2. スイッチ4個モードの設定(出荷状態。 macOS のスイッチコントロールでも利用できます。 9. macOS のスイッチコントロールで使うを参照)

スイッチ4個モードで1個のスイッチでの利用

スイッチを「でき iPad2。」の1のジャックに挿入します。  
 設定/一般/アクセシビリティ/スイッチコントロール/スイッチとタップします。  
 スイッチの項で新しいスイッチを追加/外部と選択します。  
 アクティベートしてくださいと表示します。  
 スイッチを On して、名前を付けて保存し、アクションを選択します。  
 このモードのみ長押しアクションの割り当てが可能です。  
 右図の設定したアクションをタップすると、アクションを変更できます。  
 事前設定で長押しを設定した場合は、スイッチを長く ON]することによって、異なるアクションを設定できます。

高速入力される場合は、長押しはオフをお勧めいたします。  
 5秒間スイッチを長 ON すると、トリプル HOME が、8秒間長 ON で Pad を Sleep にし、「でき iPad2。」も Sleep します。



編集を選択すると削除できます

スイッチ4個モードで複数のスイッチでの利用

このモードでは1から4まで、スイッチを4個接続し、異なるアクションを設定できます。

7-3. スイッチ ON の回数モードの設定(スイッチの ON の回数で操作)

スイッチを「でき iPad2。」の SW1のジャックに挿入します。  
 設定/一般/アクセシビリティ/スイッチコントロール/スイッチとタップします。  
 スイッチの項で新しいスイッチを追加/外部と選択します。  
 アクティベートしてくださいと表示します。  
 スイッチを1回 ON して、1-1 と名前を付けて保存し、アクションを選択します。  
 同じように、2回、3回、4回も設定します。



スイッチ ON の回数を5回以上操作できる場合は、下記の機能が利用できます。  
 5回 ON: スクリーンキーボードの表示・非表示  
 6回 ON: トリプル HOME (iOS10以降)  
 9回 ON: iPad や iPhone を Sleep にして「でき iPad2。」も Sleep になります。

上記の設定は一例です。  
 手ぶれがある場合は、1-1と1-2のアクション設定を同じにすることも方法のひとつです。  
 ハイライトメニューの理解や操作が困難な場合は、アクションをタップとすることも一案です。

<p>SW2 にスイッチを接続した場合は音楽を容易に楽しむことができます。          スイッチを1回 ON:再生・停止 2回 ON:次の曲 3回 ON:前の曲          4回 ON:ボリューム下げる 5回 ON:ボリュームを上げる          6回 ON:トリプル HOME(iOS10以降)          9回 ON で iPad や iPhone を Sleep にして「でき iPad2。」も Sleep になります。</p> <p>SW3にスイッチを接続した場合はカメラアプリにおいてシャッター機能となります。</p>	<p>スイッチコントロールのアクション設定は不要です。</p> <p>SW3 に接続した場合のみ機能します。          カメラアプリ以外では、ボリュームの機能となります。</p>
<p>7-4.スイッチ対応アプリモードの設定 Space・Enter・1・3を利用する (スイッチコントロールは OFF で利用)</p>	
<p>Space・Enter・1・3のキーを用いるアプリの操作モードです。          「でき iPad2。」には、スイッチ1からスイッチ4まで接続でき、このモードでの信号は次のようになります。          SW1 を ON すると Space、SW2 を ON すると Enter、SW3 を ON すると1、SW4 を ON する3とが出力します。</p> <p>*このモードは、スイッチコントロールでも利用できます。7-3項のアクションをそのまま利用できます。          スイッチコントロールの長 ON には対応しません。(長 ON をご利用したい場合は、スイッチ4個モードをご利用ください。)</p>	<p>5秒間スイッチを長 ON すると、トリプル HOME が、8秒間長 ON で Pad を Sleep にし、「でき iPad2。」も Sleep します。</p>
<p>7-5. トーキングエイド for iPad モードの設定 (スイッチコントロールは OFF で利用)</p>	
<p>トーキングエイドの設定を初期値のままのオートスキャンで利用できます。          出力されるキーは次のとおりです。          SW1:Space SW2:h SW3:k SW4:L</p> <p>*このモードは、スイッチコントロールでも利用できます。その場合は、アクション設定が必要となります。T-1 と T-4 の名前を付けてアクションを設定します。          SW1 から SW3 までは同一の信号です。スイッチコントロールの長 ON には対応しません。(長 ON をご利用したい場合は、スイッチ4個モードをご利用ください。)</p> <p>トーキングエイド for iPad は、U-PLUS Corporation 社の製品です。          専用のスイッチ BOX があります。</p>	<p>トーキングエイド for iPad はスイッチコントロールは OFF で利用します。</p> <p>5秒間スイッチを長 ON すると、トリプル HOME が、8秒間長 ON で Pad を Sleep にし、「でき iPad2。」も Sleep します。</p> <p>トリプル HOME で、スイッチコントロールの ON/OFF ができますので、トーキングエイドの操作に切り替えることができます。8項の左下欄をご参照ください。</p>

## 8.ご利用者以外に iPad・iPhone を利用する場合の設定（必要によって行ってください）

スイッチコントロールを ON/OFF するために設定に入っておこないますと、誤って設定変更をしまいがちです。

このことを防止するための設定と利用方法です。

	<p>設定/一般/アクセシビリティ/ショートカットと進みます。</p>
	<p>スイッチコントロールにチェックを入れます。 AssistiveTouch にもチェックを入れます。 2つ以上チェックを入れると、アクセシビリティのショートカットが表示されます。</p>
	<p>HOME ボタンを3回 ON する間隔を設定します。 タップすると振動とフラッシュで間隔を体感できます。</p>
	<p>ショートカットの表示がオフから確認に変わります。</p>
	<p>AssistiveTouch のチェックを外すとこの表示はなく、スイッチコントロールの ON/OFF ができます。 「でき iPad 2。」のトリプル HOME 機能を利用して、スイッチコントロールの ON/OFF ができます。</p> <p>HOME に戻ります。 HOME ボタンを3回連続 ON して、表示されるメニューからスイッチコントロールを選択してそのモードになることを確かめます。</p> <p>このようにしますと、HOME ボタンの3回 On で設定を選択できるようになります。</p>


## 9 .macOS を 10.12 Sierra 以降のスイッチコントロールで使う (iOS10.1 以降)

9-1.iPad のスイッチコントロールでデバイス/ほかのデバイスを使用を選択します。

9-2.ハイライトメニューに Mac が表示しましたら選択し、さらに接続を選択しますと、macOS のスイッチコントロールが起動しそのまま Mac の操作ができます。



9-3. Mac のスイッチコントロールの操作を終了するには、ホームスイッチの画面でデバイスを選択し接続を解除を選択します。

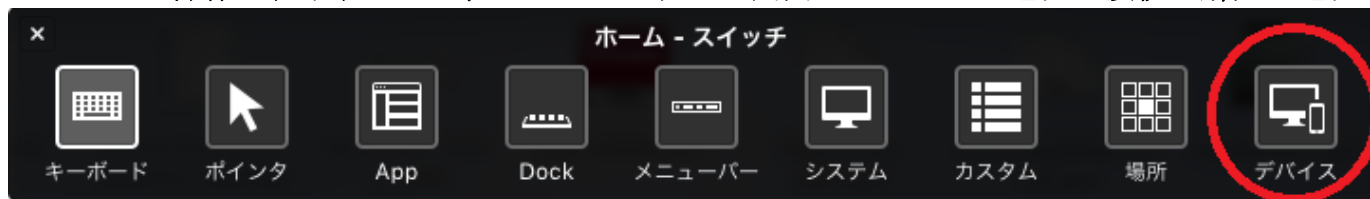

## 10. 個人と公共の設定について (DIP スイッチ 3)

動作中にこのスイッチを切り替えた場合は、かならずリセットボタンを押してください。

ON(個人):「でき iPad2。」は4台までペアリング情報を記憶します。再ペアリングせずに利用できます。

ペアリング情報記憶は4台までとなります。(4台の接続制限の解除は、11項をご覧ください)

「でき iPad2。」はスイッチ操作が無い場合の Sleep に移行時間が 10 分になります。

OFF(公共):展示場や学校では5台目以降は接続できないのでは困ります。(接続台数制限は CPU の仕様です)

そこで、DIP スイッチ3が OFF の場合は、ペアリング情報を記憶しない機能を設けました。

「でき iPad2。」やiPadが Sleep になった場合、接続が切れます。再度、ペアリングを行ってください。

iOS9では正常に機能しますが、iOS10では、誤った接続となります。この場合、接続と表示されても“スイッチコントロールのデバイスが見つからない”との警告が表示されますので「でき iPad2。」の接続を解除して再度、ペアリングを行ってください。

「でき iPad2。」はスイッチ操作が無い場合の Sleep に移行時間が 30 分になります。

## 11. ペ어링 4 台までの制限をクリアする方法

5 台目以降も接続して利用したい場合は、4 台までの制限を解除する必要があります。

電池部のスライドカバーを外し、右側の押ボタンを指一本で二つを同時に ON し、さらに右端の押ボタンのみを放すとピーと長めの音がします。これで、5 台目以降の接続制限は解除されます。(場合によっては4回同じ操作を繰り返します)

ただし、それまでの4台との再接続はできなくなりますので、再ペ어링が必要となります。

(iOS10 では、iPad には接続と表示されますが、見かけの接続なので、“スイッチコントロールのデバイスが見つかりません”のエラーが表示されます。その場合は、iPad に表示されている DekiiPad2 のデバイスを削除して再ペ어링してください。

## 12. ボタン電池の交換

### 12-1. ボタン電池の残量

電池残量が少なくなると、再ペ어링の際にブザー音が低くなったり、繰り返し不規則に鳴ったりスイッチの反応が乱れます。

その際は、DIP スイッチ4番を OFF にすることによって、電池使用を延ばすことが可能となりますので、電池を購入してください。

### 12-2. ボタン電池の交換

切り欠きに親指の爪を立てるようにしてずらしてはずします。電池が外れにくい場合は、いったん、電池の中央部を押してからおこなってください。電池を外す際には、ピンセットなどは使わないでください。電池のショート事故につながります。

電池の挿入は、プラスを上面にして入れます。5VDC (microUSB) を利用する場合は、電池を外してください。

## 13. スイッチの抜き差し

操作スイッチを「でき iPad2。」に抜き差しする場合は、まれに「でき iPad2。」が、誤動作する場合があります。できれば、Reset ボタンを押したまま行うか、または「でき iPad2。」の電源を切っておこなってください。

## 14. 「でき iPad 2。」でできないこと

フリーハンドで文字や図を描くことや iOS 製品以外の操作。

## 15. サポート & 問い合わせ

ホームページのサポート&問い合わせをご覧ください。

以下の内容を添えてお問い合わせください。

iOS 製品名・iOS のバージョン・「でき iPad2。」のシリアル番号・不具合の内容

## 16.電話サポートを受けたい

ホームページのサポート予約サイトからお問い合わせください。

ご希望の日時をメールにて確認後、こちらからお電話いたします。

## 17.ご注意とお願い

17-1. 発熱の危険がありますので、「でき iPad。」のユニットをベッドの中に入れてください。

17-2. 乳幼児のいるご家庭では、ボタン電池の誤飲にご注意ください。

17-3. 5VDC で電源供給する際のケーブルは、良質なケーブルをご利用ください。

17-4. 近くで扇風機のような電化製品を ON/OFF すると、「でき iPad2。」は Sleep から復帰することがあります。

17-5. 「でき iPad2。」動画説明のサイトにつきましては、「できマウス。」プロジェクトのサイトをご参照ください。

17-6. iOS をアップデート後に、「でき iPad2。」での操作ができない場合は、設定の Bluetooth のデバイス一覧から「でき iPad2。」を削除して、再ペアリングを行ってみてください。

17-7. ジャックの丸ナットはスイッチへのストレス防止のため、軽く締めてあります。緩んだ場合は指先で絞めてください。

ジャックの丸ナットは、はずれましても機能には影響はありません。

17-8. 電池を利用しない場合は、電池を外してください。

## 18.ご協力をお願い

「でき iPad2。」は生れたてです。テストは数多くおこないましたが、今後どのような不具合が生じるかはわかりません。

決めつけない・あきらめないで、ご意見・愛ディアをお寄せくださいますようお願いいたします。

「でき iPad2。」が、iOS 製品を操作する際の入力支援機器として、選択肢の一つに加えていただけたらうれしいです。

「できマウス。」プロジェクト

<http://dekimouse.org/wp/>

内容がまだ充実しておりません。みなさんからのご協力を得ながら充実していければと願っております。

このマニュアルは、<http://dekimouse.org/wp/> から PDF でダウンロードできます。

iOS 機器では、マニュアルを iBooks の書棚に取り込むことができます。

