

PC 機器管理ご担当様へ

「でき iPad2。」は、ペアリング情報を4台まで記憶いたします。

この機能は、複数台の iPad などをご利用される場合は、下記の注意が必要となります。
シリアル番号も確認できます。

ペアリング

1. ペアリングは、設定/Bluetooth と進み、画面スイッチを緑にします。
2. 「でき iPad2。」の電源を入れると、LED が緑に点滅します。放置した場合、約30秒後に消灯します。その場合は、接続した外部スイッチを ON するか、右図のリセットボタンを ON すると緑色の点滅が再開します。
3. DekiiPad2 が検出された場合、タップすると接続のメニューが表示されますので、指示に従って進みます。
もし、DekiiPad2 が検出されない場合は、Bluetooth の画面スイッチを緑から白そして緑と入れなおせば表示します。
LED が緑点灯 (マウスモード時は赤点灯) すれば、ペアリング完了です。ペアリング情報は「でき iPad2。」の電源を切っても記憶されます。



複数の iOS 機器でのご利用時の注意点

1. 仮にシリアル番号 12345 の「でき iPad2。」(以後 A と称します)を**複数の iOS 機器とペアリングが完了している場合。**

A のそばに、この複数の iOS 機器が Sleep の状態で存在している場合は、どれかと自動再接続してしまいます。

複数の iOS 機器の電源が OFF あるいは、Bluetooth 接続が OFF の場合はこの問題は発生しません。

A のそばに、この複数の iOS 機器が Sleep の状態で存在している場合は、A に再接続したい iOS 機器のみ電源や Bluetooth 接続を ON してください。

基本的には、A から約1mと約5mに iOS 機器があった場合は、近くの方の再接続が優先されますが、電波状況によっては5m離れた iOS 機器と接続する場合があります。

「でき iPad2。」は、接続時の検索出力を通常より Bluetooth 出力低く抑えております。接続後は通常の出력에戻しております。

2. 「でき iPad2。」は一定時間スイッチ操作が無い場合、DeepSleep モードになり、接続したスイッチを ON しますと DeepSleep から抜けます。この時も、前項同様の配慮が必要となります。

3. 前項の対策としましては、「でき iPad2。」に管理番号を付与し、iOS 機器側にも「でき iPad2。」の管理番号を付与し、可能な限り、A とのペアリングする iOS 機器を少なめにすることがあげられます。
4. 4台を超えて他の iOS 機器とペアリングしたい場合は、マニュアルに沿って一度ペアリング情報をクリアしてから再度行ってください。
“接続済み”と表示しましても、“スイッチコントロールのデバイスが見つかりません”となってしまいます。見かけの接続となる場合があります。
いったん、Bluetooth デバイス一覧で接続と表示の「でき iPad2。」を削除して再度ペアリングしてください。

電池でのご利用の際は、電池消費時間数のデータはありません。予備の電池をご用意ください。

DIP スイッチ4番を OFF にしてブザー音を停止しますと電池は長持ちします。

予備のバッテリーの例（充電で約1ヶ月利用可能）

モバイルバッテリーについては、マニュアルの
“13.ボタン電池の交換”の項をご参照ください。

室内での AC アダプタでの利用の例

AC アダプタ(iOS機器付属品でも可)とmicroUSBケーブル



電話での無料通話サポートもおこなっております。

「でき iPad2。」に限定いたすことなく、皆様のご質問にお応えしてまいります。

ご希望の日時に、こちらからお電話いたします。https://dekimouse.org/wp/dekiipad_support_yoyaku/
また、iOS/iPadOS のアップデートの際は、ホームページで「でき iPad2。」が対応しているかのご確認後に行われますようお願いいたします。

ホームページでは、設定方法などを動画でご案内いたしております。

ご要望や愛ディアがありましたら、お気軽にお寄せください。

トップページ



サポート依頼



「できマウス。」プロジェクト

<https://dekimouse.org/wp/>